



Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-200E

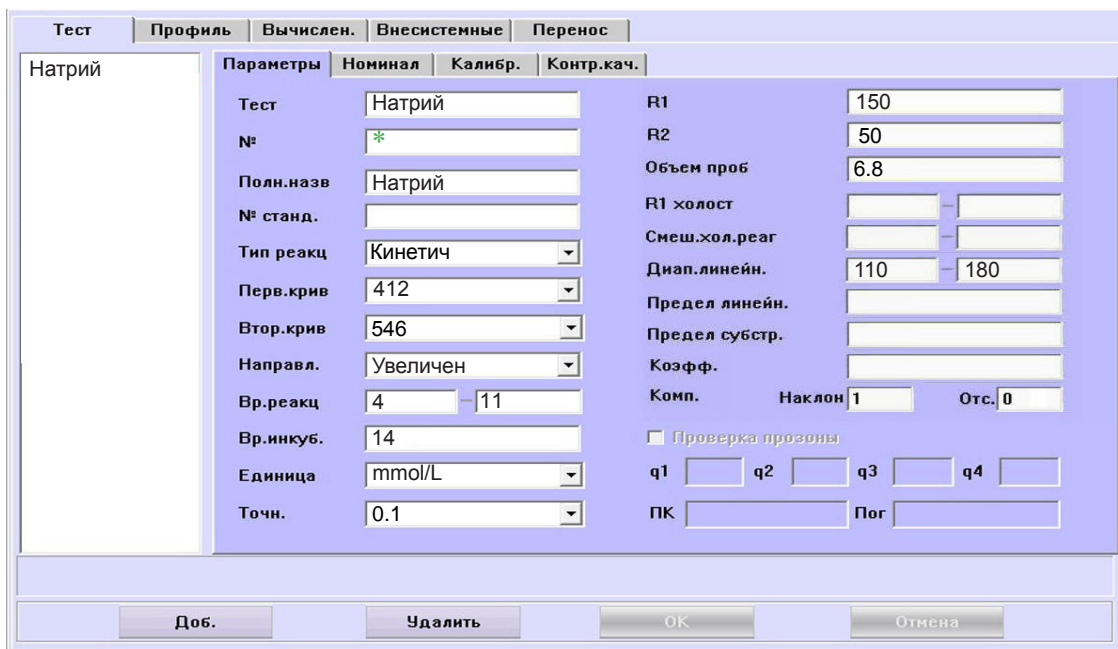

* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

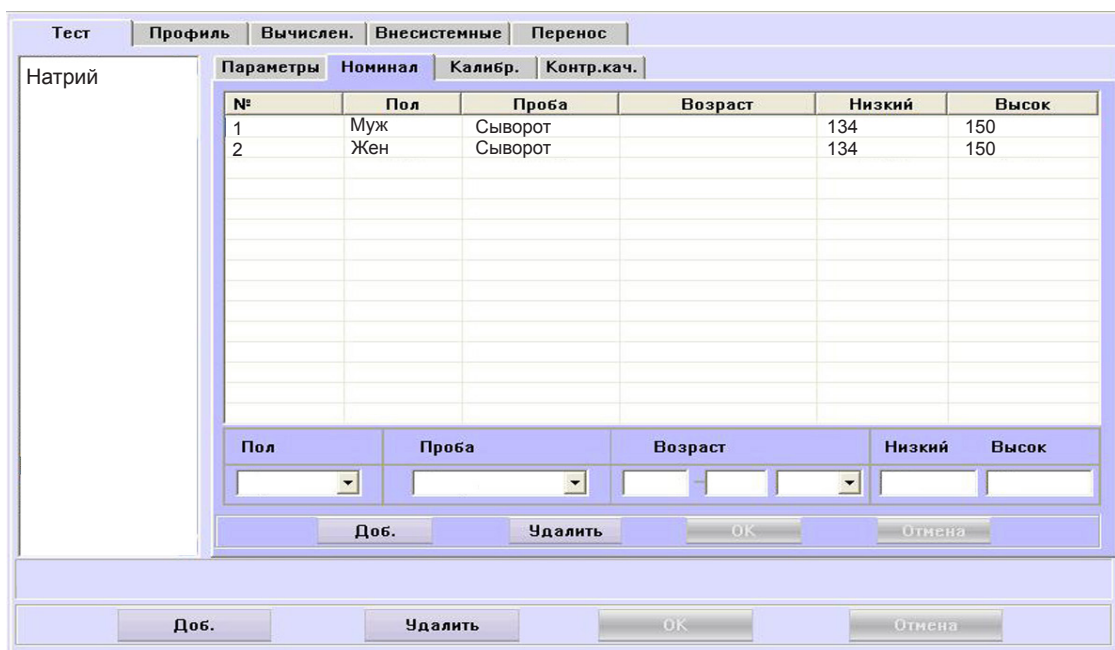

№	Пол	Проба	Возраст	Низкий	Высокий
1	Муж	Сыворот	134	134	150
2	Жен	Сыворот	134	134	150

Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-200E

Назв.	Конц.
<input checked="" type="checkbox"/> Na-1	120**
<input checked="" type="checkbox"/> Na-2	160**

** -вводится из инструкции.

Тип калибровки: Линейная, по 2-ум стандартам из набора (120 и 160 ммоль/л)
Контроль по TruLab N и TruLab P.