


Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-120

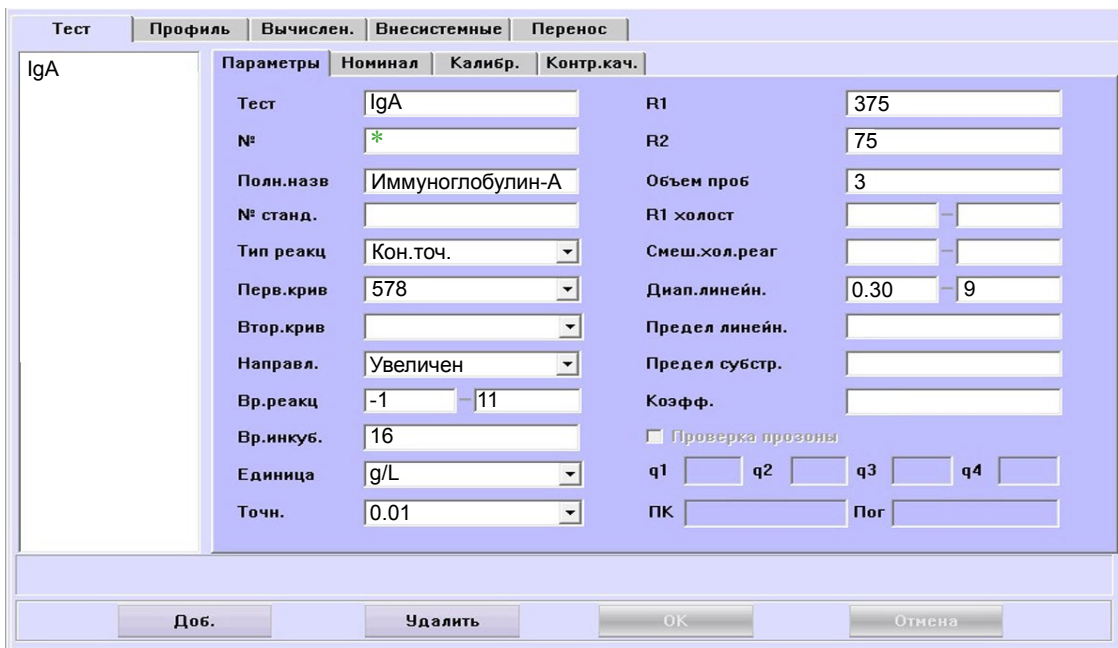

Тест: IgA

Параметры


Тест	IgA	R1	375
№	*	R2	75
Полн.назв	Иммуноглобулин-А	Объем проб	3
№ станд.		R1 холост	
Тип реакц	Кон.точ.	Смеш.хол.реаг	
Перв.крив	578	Диап.линейн.	0.30 - 9
Втор.крив		Предел линейн.	
Направл.	Увеличен	Предел субстр.	
Вр.реакц	-1 - 11	Коефф.	
Вр.инкуб.	16	<input type="checkbox"/> Проверка прозоны	
Единица	g/L	q1	q2
Точн.	0.01	q3	q4
		ПК	Пог

Доб. Удалить ОК Отмена

* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

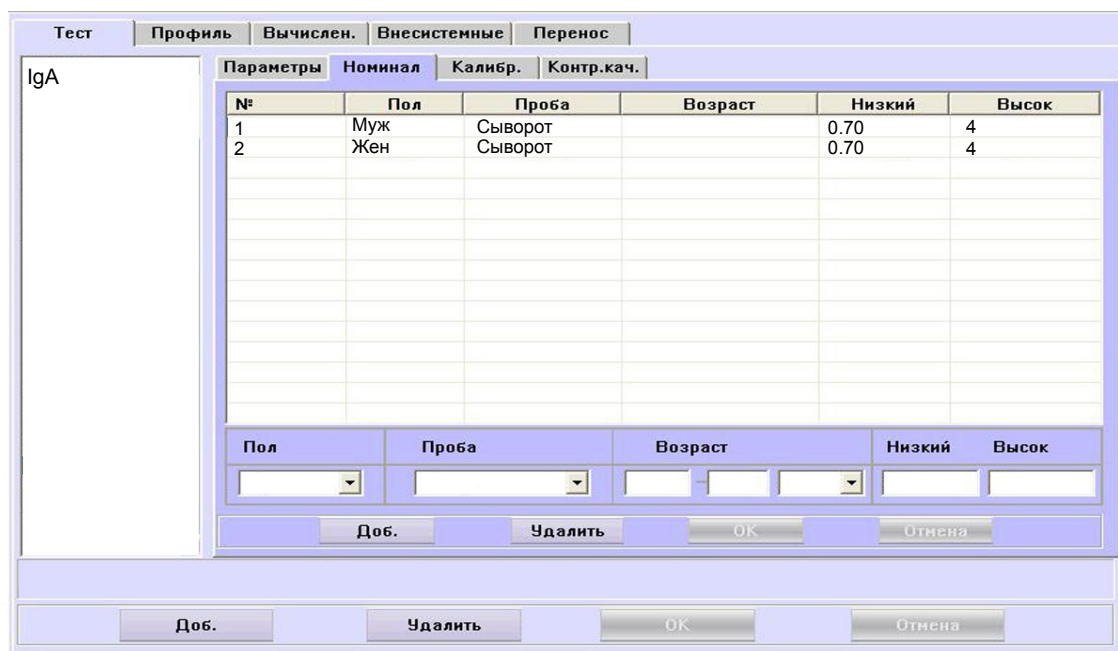

Тест: IgA

Параметры


№	Пол	Проба	Возраст	Низкий	Высок
1	Муж	Сыворот		0.70	4
2	Жен	Сыворот		0.70	4

Пол Проба Возраст Низкий Высок

Доб. Удалить ОК Отмена

Доб. Удалить ОК Отмена

Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-120

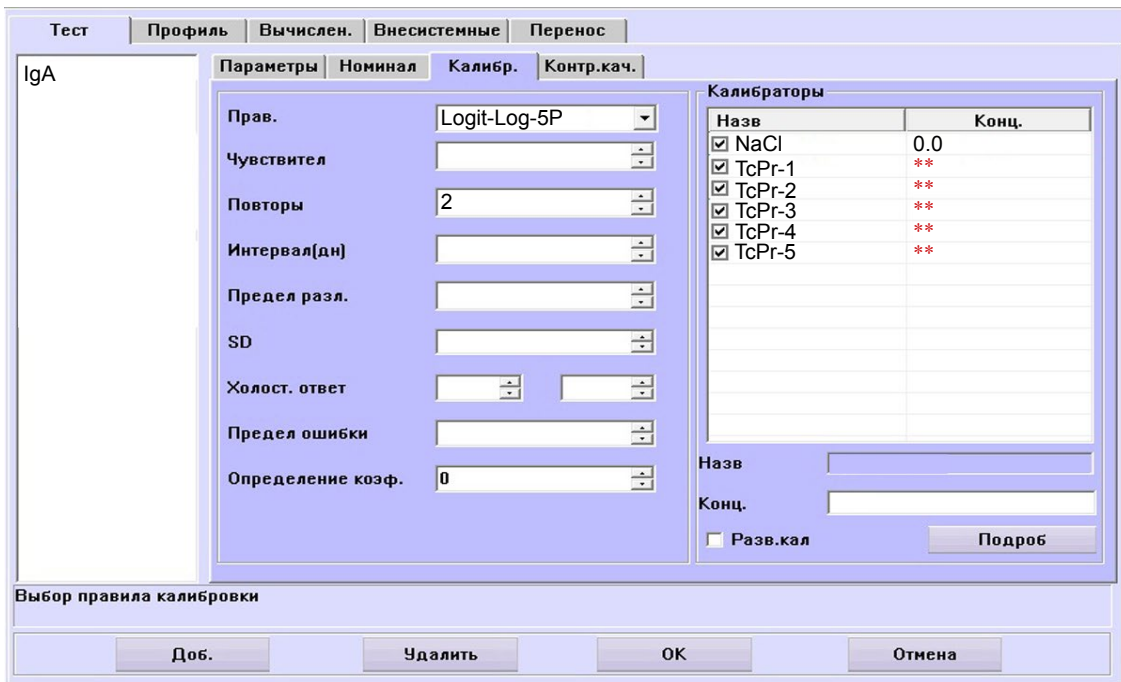

Тест | Профиль | Вычислен. | Внесистемные | Перенос

ИгА

Параметры | Номинал | Калибр. | Контр.кач.

Прав. Logit-Log-5P

Чувствител. []

Повторы 2

Интервал(дн) []

Предел разл. []

SD []

Холост. ответ [] []

Предел ошибки []

Определение коэф. 0

Калибраторы

Назв	Конц.
<input checked="" type="checkbox"/> NaCl	0.0
<input checked="" type="checkbox"/> TcPr-1	**
<input checked="" type="checkbox"/> TcPr-2	**
<input checked="" type="checkbox"/> TcPr-3	**
<input checked="" type="checkbox"/> TcPr-4	**
<input checked="" type="checkbox"/> TcPr-5	**

Назв []

Конц. []

Разв.кал

Подроб

Выбор правила калибровки

Доб. | Удалить | ОК | Отмена

** - вводится из паспорта к калибратору

Значения калибраторов и контрольных материалов вводить в пунктах меню «Калибр.» и «Контр.кач.» соответственно.

Тип калибровки: Логит-лог5р, (сплайн), 6 точек (набор стандартов TruCal Protein, 5 уровней + вода (или физраствор)).

Контроль по TruLab Protein уровень 1 и уровень 2 или по TruLab N и TruLab P.