

Фосфолипиды

PAF, enzymatic (ферментативный метод)



Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-380

* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

Фосфолипиды

PAF, enzymatic (ферментативный метод)



Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-380

Т. Перенос Профиль Выч. Внесист STAT

Т.
ФЛип

Основ Нонин Калиб Контр

Калиб

Прав Двухточ.линейн

Пов 2

К

Калибр.

Калиб	№ парт	ртная концен	Годеп	Поз.
Вода		0.0		
TruCalL		**		

Критерии правил

Чувств.

Козф. диф

SD

Хол.погл

Предел

Кор.коэф

Калиб Сохр. Отмен Разв

** -вводится из паспорта к калибратору

Тип калибровки: линейная. Используется калибратор – Phospholipids standard.
Контроль по TruLab N и TruLab P, или по TruLab L (липидный) уровень 1 и уровень 2.