


Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-200 / 200new.

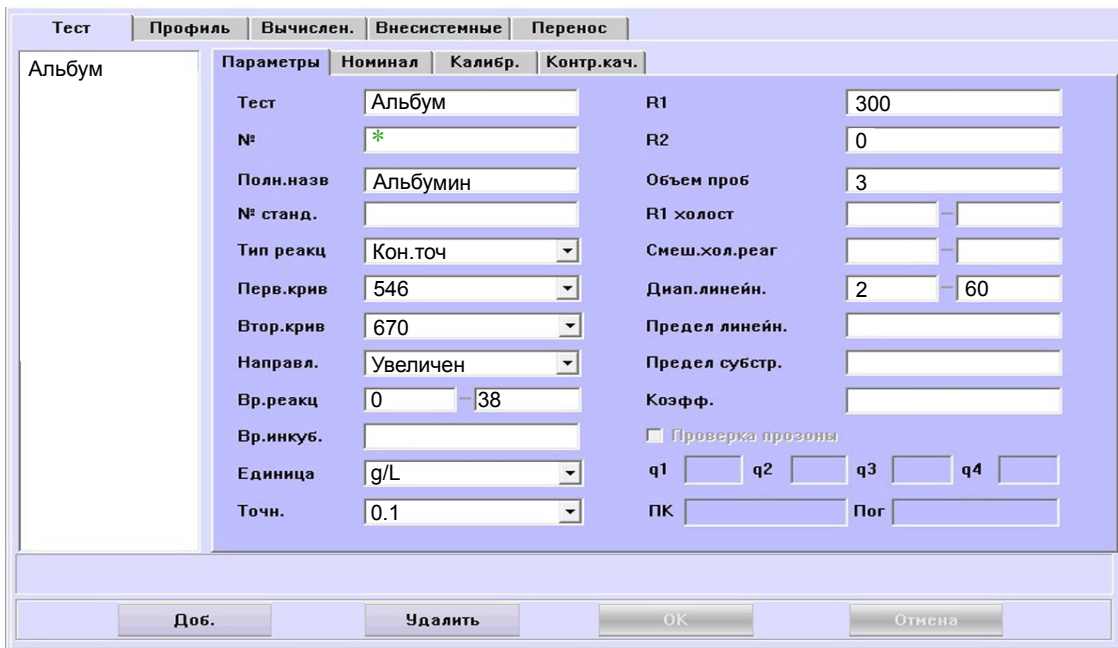


Тест	Альбум	R1	300
№	*	R2	0
Полн.назв	Альбумин	Объем проб	3
№ станд.		R1 холост	
Тип реакц	Кон.точ	Смеш.хол.реак	
Перв.крив	546	Диап.линейн.	2 - 60
Втор.крив	670	Предел линейн.	
Направл.	Увеличен	Предел субстр.	
Вр.реакц	0 - 38	Коефф.	
Вр.инкуб.		<input type="checkbox"/> Проверка прозоны	
Единица	g/L	q1	q2
Точн.	0.1	q3	q4
		ПК	Пог

* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами


Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

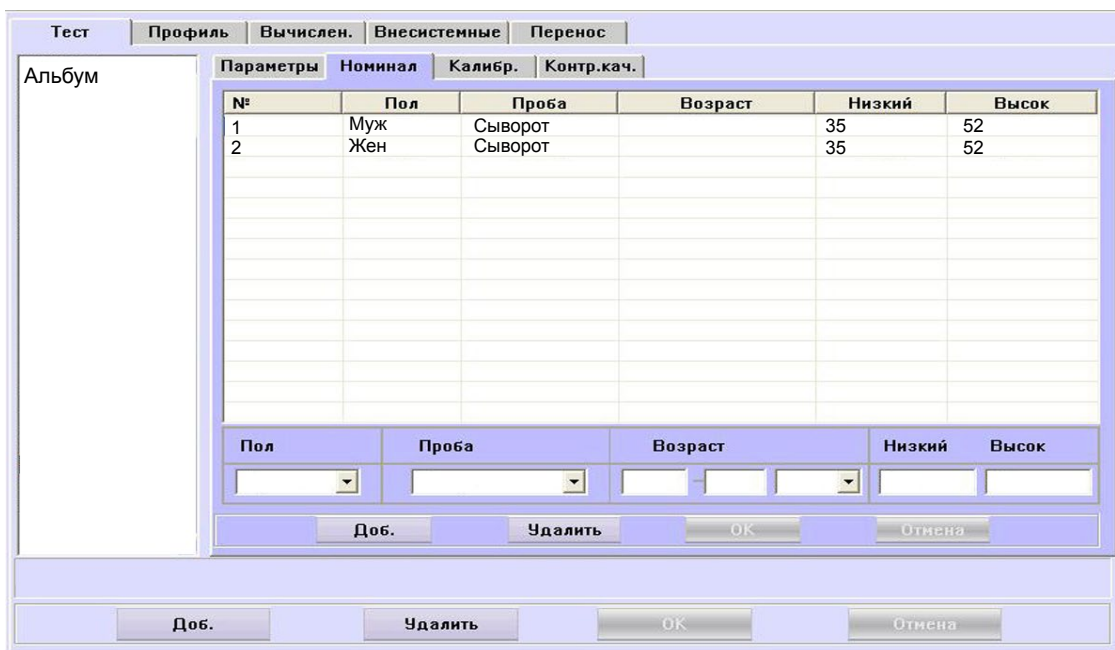

№	Пол	Проба	Возраст	Низкий	Высок
1	Муж	Сыворот	35	52	
2	Жен	Сыворот	35	52	

Тип калибровки: Линейная (калибратор TruCalU).
Контроль по TruLab N и TruLab P.

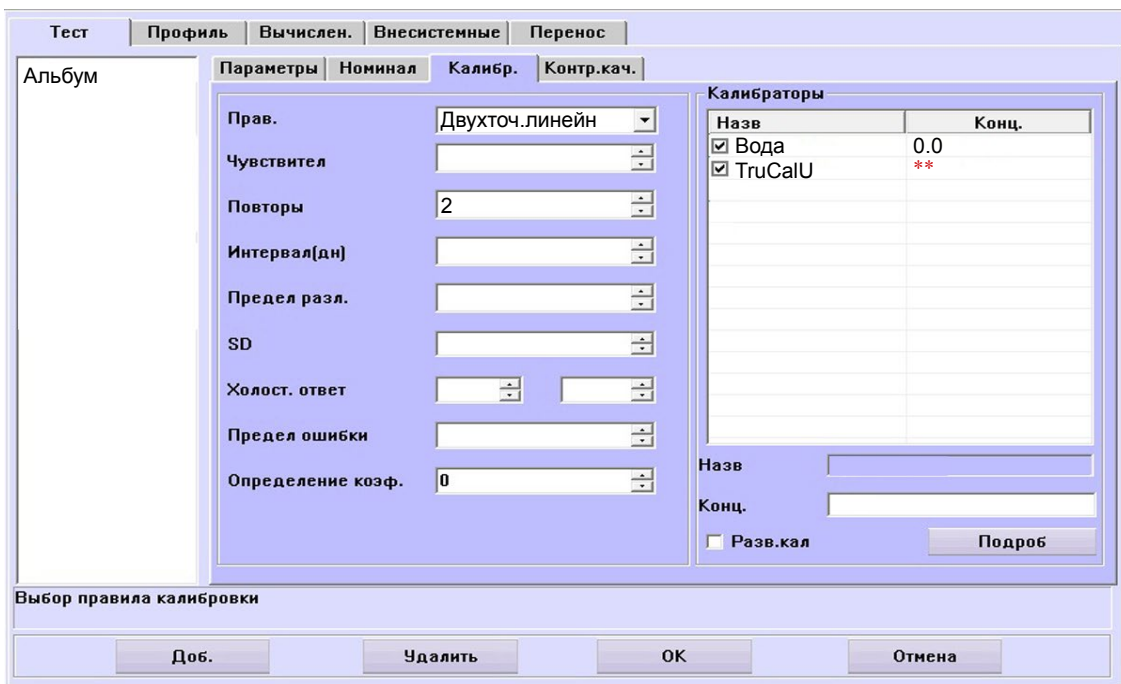

Назв	Конц.
<input checked="" type="checkbox"/> Вода	0.0
<input checked="" type="checkbox"/> TruCalU	**

** - вводится из паспорта к калибратору

Значения калибраторов и контрольных материалов вводить в пунктах меню «Калибр.» и «Контр.кач.» соответственно.