

(PCT)

ИттипоTD (Иммунотурбодиметрический с латексными частицами)



Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-120

Тест | Профиль | Вычислен. | Внесистемные | Перенос

Параметры | Номинал | Калибр. | Контр.кач.

Тест: PCT

№: *

Полн.назв: Прокальцет

№ станд.:

Тип реакц: Кинетика

Перв.крив: 670

Втор.крив:

Направл.: Увеличен

Вр.реакц: 4 - 14

Вр.инкуб.: 16

Единица: ng/ml

Точн.: 0.01

R1: 180

R2: 60

Объем проб: 15

R1 холост:

Смеш.хол.реак:

Диап.линейн.: 0 - 35

Предел линейн.:

Предел субстр.:

Коефф.:

Проверка прозоны

q1: q2: q3: q4:

ПК: Пог:

Доб. | Удалить | OK | Отмена

* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

Тест | Профиль | Вычислен. | Внесистемные | Перенос

Параметры | Номинал | Калибр. | Контр.кач.

№	Пол	Проба	Возраст	Низкий	Высокий
1	Муж	Сыворот		0	0.5
2	Жен	Сыворот		0	0.5

Пол: Проба: Возраст: Низкий: Высокий:

Доб. | Удалить | OK | Отмена

(PCT)

ИттипоTD (Иммунотурбодиметрический с латексными частицами)



Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-120

Назв.	Конц.
<input checked="" type="checkbox"/> PCT-0	0.0
<input checked="" type="checkbox"/> PCT-1	**
<input checked="" type="checkbox"/> PCT-2	**
<input checked="" type="checkbox"/> PCT-3	**
<input checked="" type="checkbox"/> PCT-4	**
<input checked="" type="checkbox"/> PCT-5	**

Значения калибраторов и контрольных материалов целесообразно вводить в пунктах меню «Калибр.» и «Контр.кач.» соответственно.

** -вводится из паспорта к калибратору (TruCal PCT, включает калибратор с конц. 0).
Контроль по TruLab PCT уровень 1 и уровень 2.