



## Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-400

### Биреагентное применение

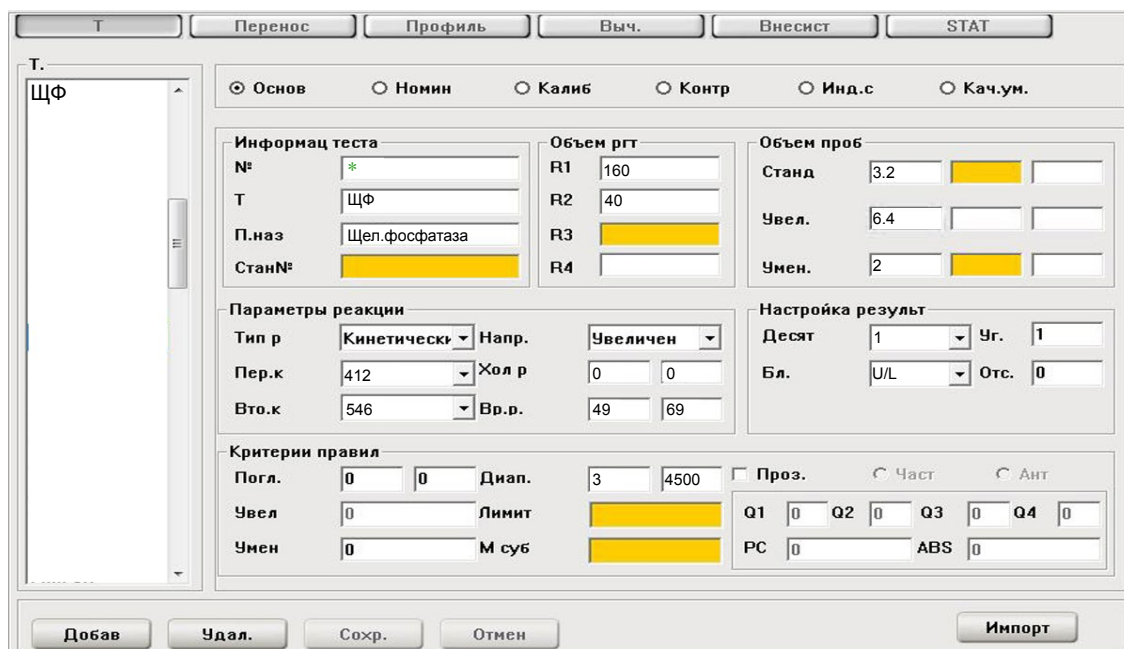


### Монореагентное применение

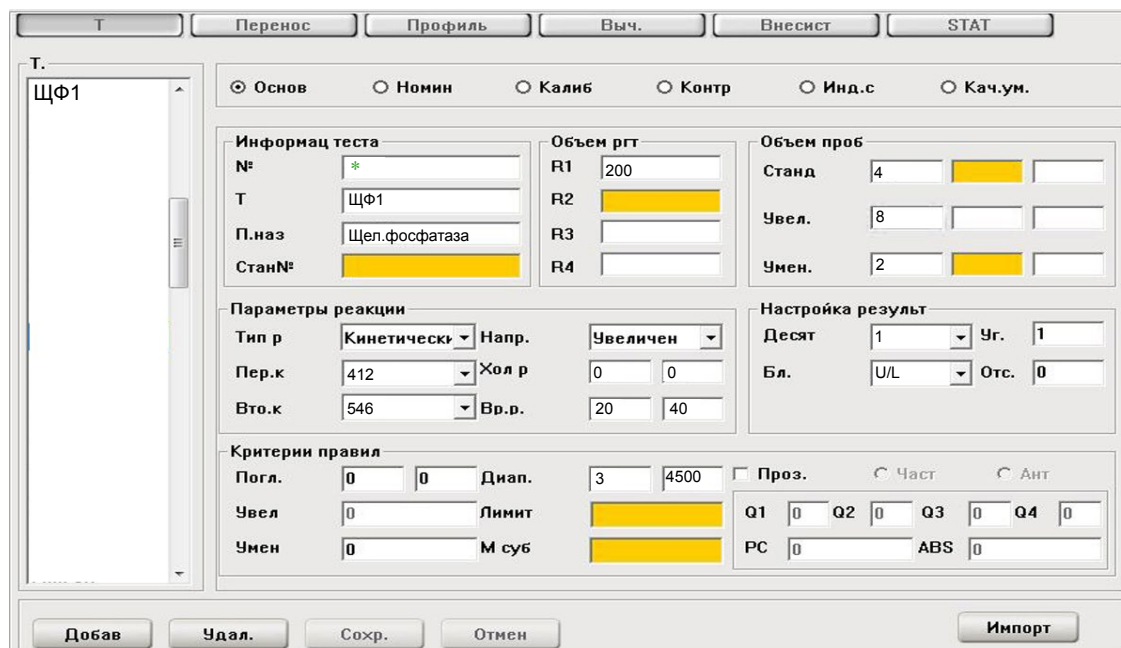

\* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

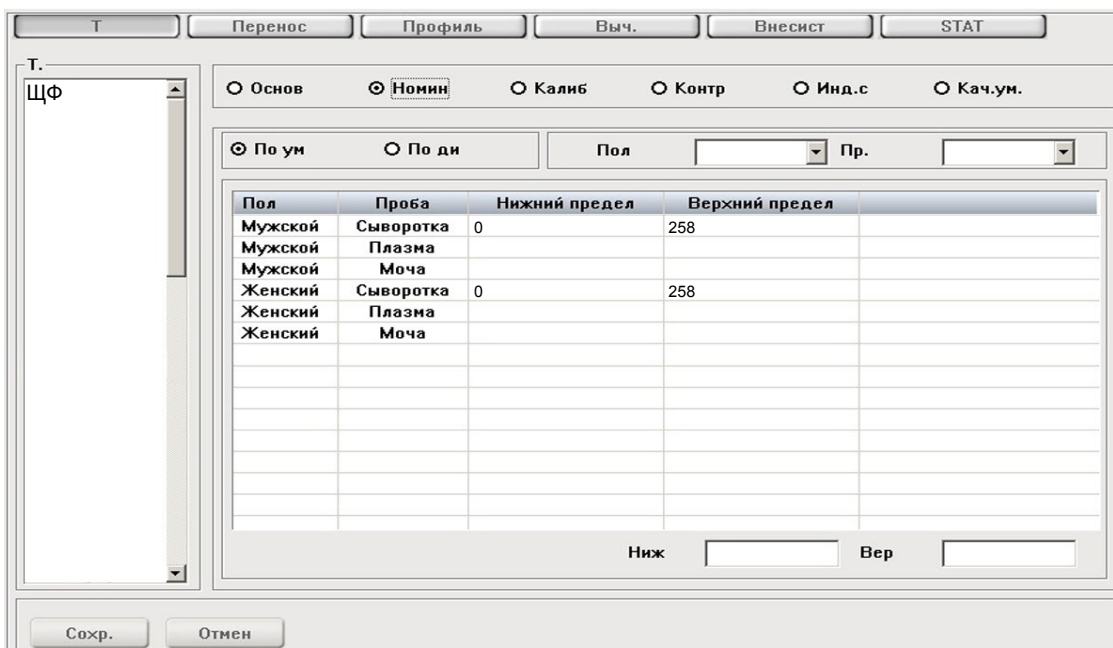

Т. ЩФ


Основ  Нормин  Калиб  Контр  Инд.с  Кач.ум.

По ум  По ди  Пол: [ ] Пр.: [ ]

Пол	Проба	Нижний предел	Верхний предел
Мужской	Сыворотка	0	258
Мужской	Плазма		
Мужской	Моча		
Женский	Сыворотка	0	258
Женский	Плазма		
Женский	Моча		

Ниж: [ ] Вер: [ ]

Сохранить Отменить

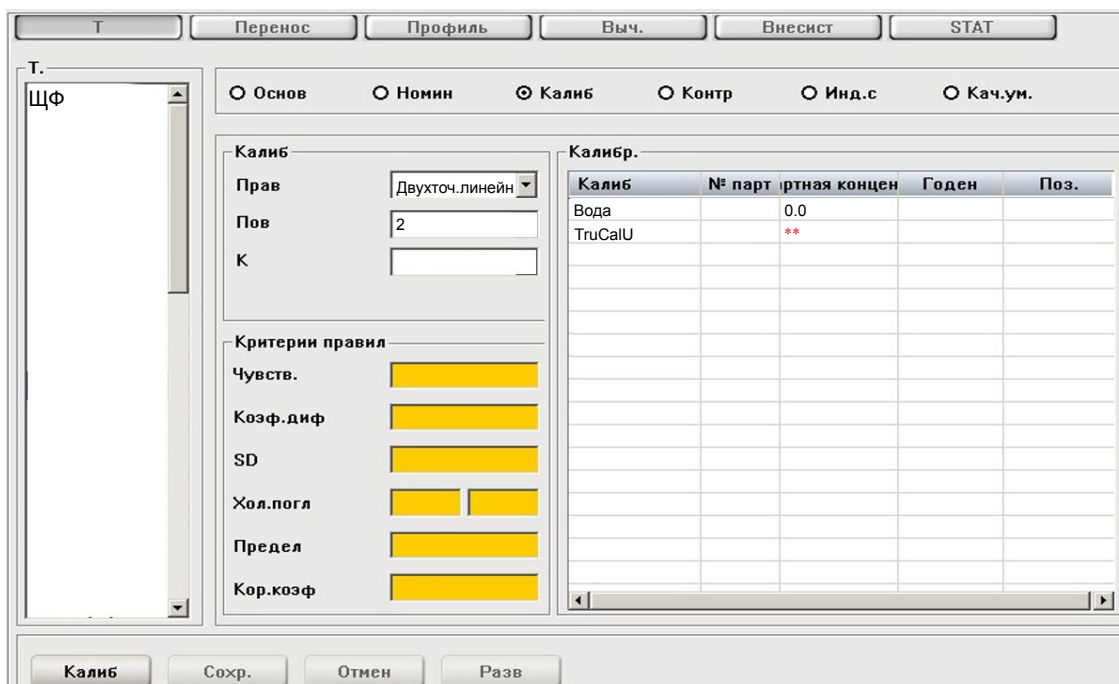

Т. ЩФ

Основ  Нормин  Калиб  Контр  Инд.с  Кач.ум.

Калиб

Прав: Двухточ.линейн

Пов: 2

К: [ ]

Критерии правил

Чувств. [ ]

Козф. диф [ ]

SD [ ]

Хол. погл [ ]

Предел [ ]

Кор. коэф [ ]

Калибр.

Калиб	№ парт	Иртная концен	Годеи	Поз.
Вода		0.0		
TruCalU		**		

Калиб Сохранить Отменить Разв

\*\* - вводится из паспорта к калибратору

Тип калибровки: Линейная (калибратор TruCalU) или по фактору.  
Контроль по TruLab N и TruLab P.