

Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-400


* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

Пол	Проба	Нижний предел	Верхний предел
Мужской	Сыворотка	0	100
Мужской	Плазма		
Мужской	Моча		
Женский	Сыворотка	0	100
Женский	Плазма		
Женский	Моча		

Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-400

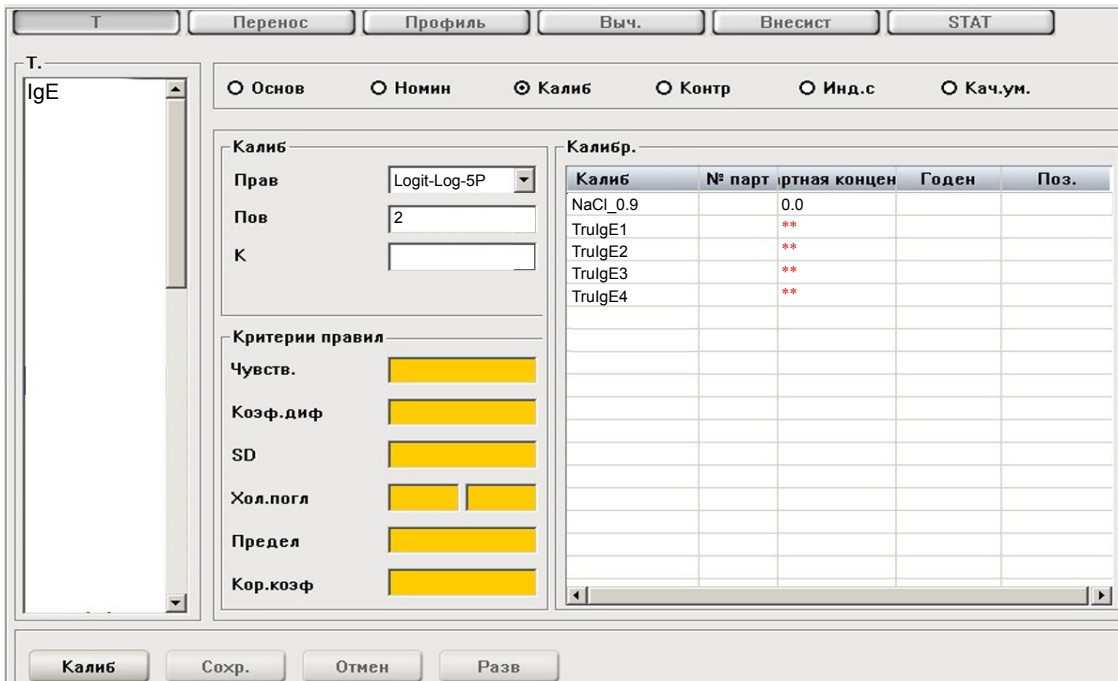

Т. IgE

Калиб

Прав Logit-Log-5P

Пов 2

К

Критерии правил

Чувств. [Yellow bar]

Козф. диф [Yellow bar]

SD [Yellow bar]

Хол. погл [Yellow bar]

Предел [Yellow bar]

Кор. коэф [Yellow bar]

Калибр.

Калиб	№ парт	ртная концен	Годеп	Поз.
NaCl_0.9		0.0		
TruIgE1		**		
TruIgE2		**		
TruIgE3		**		
TruIgE4		**		

Калиб Сохр. Отмен Разв

** - вводится из паспорта к калибратору

Тип калибровки: logit-log-5P, 6 точек, набор стандартов TruCal IgE, 5 уровней + вода (или физр-р).

Контроль по TruLab Protein уровень 1 и уровень 2 или по TruLab N и TruLab P.