



## Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-120 (биреагент)

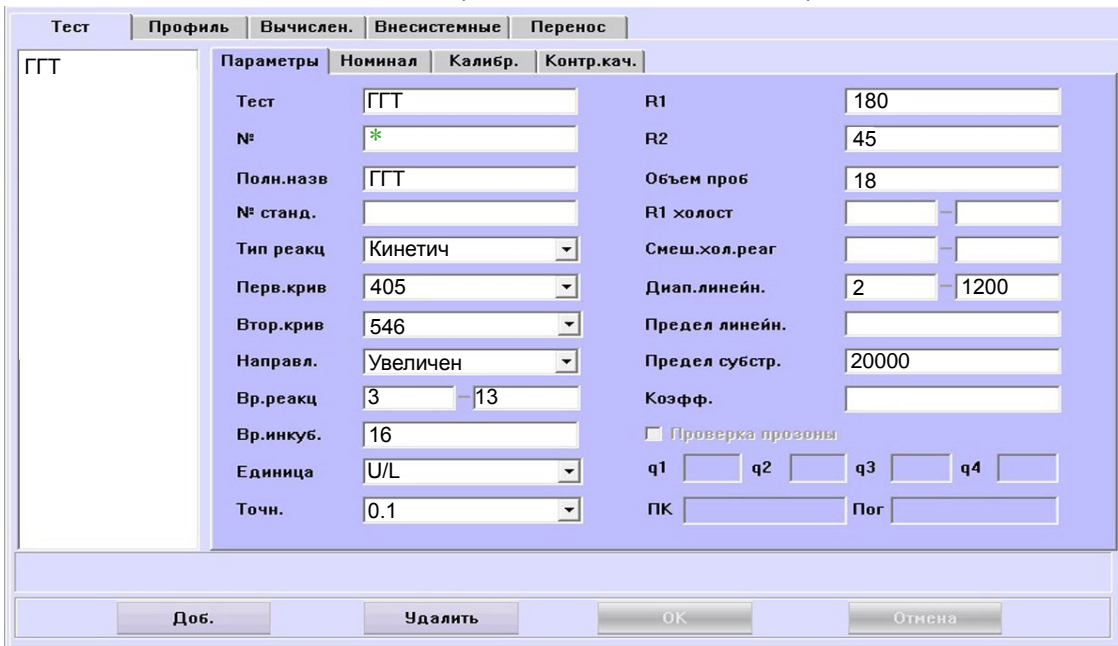

\* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами

## Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-120 (монореагент)

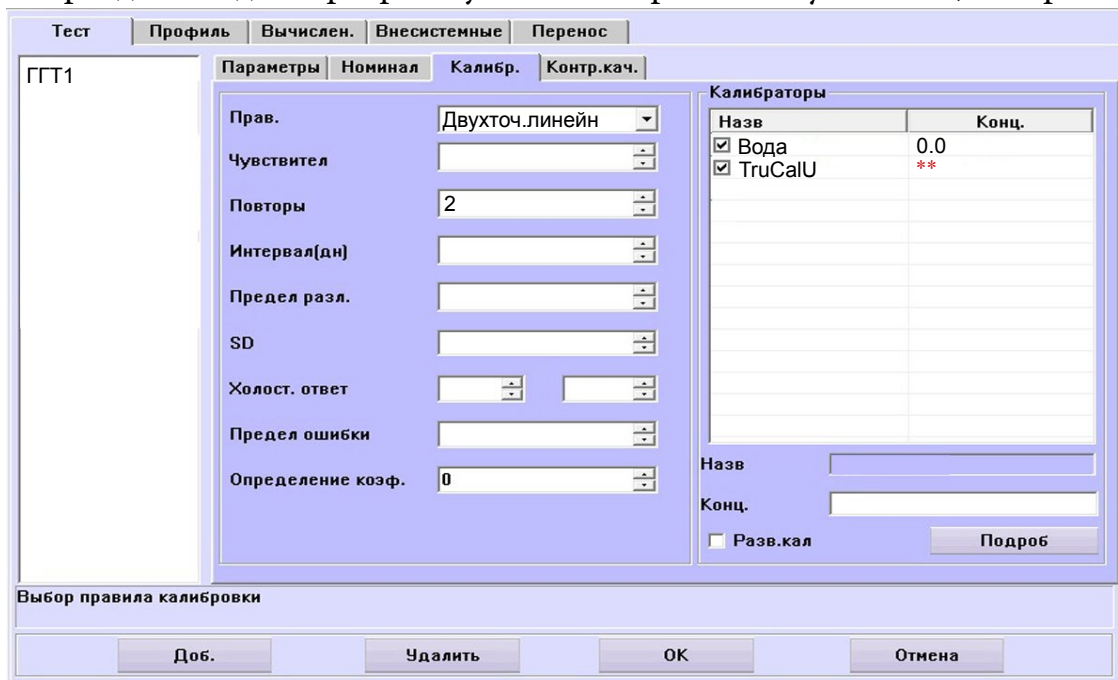


\*\* -вводится из паспорта к калибратору


При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

## Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-120

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

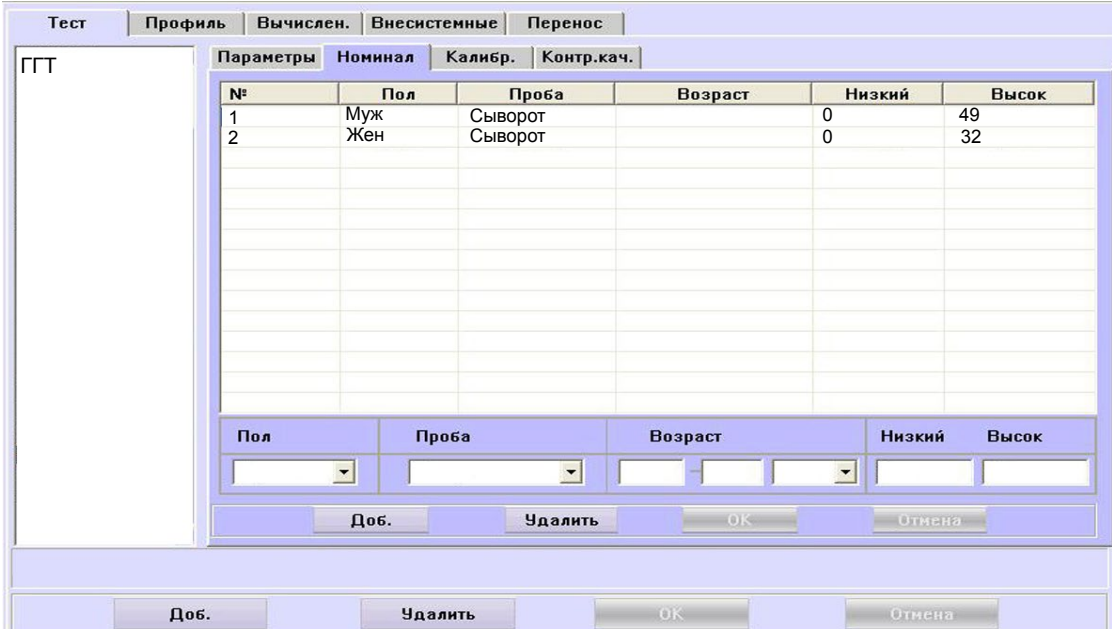

№	Пол	Проба	Возраст	Низкий	Высок
1	Муж	Сыворот		0	49
2	Жен	Сыворот		0	32

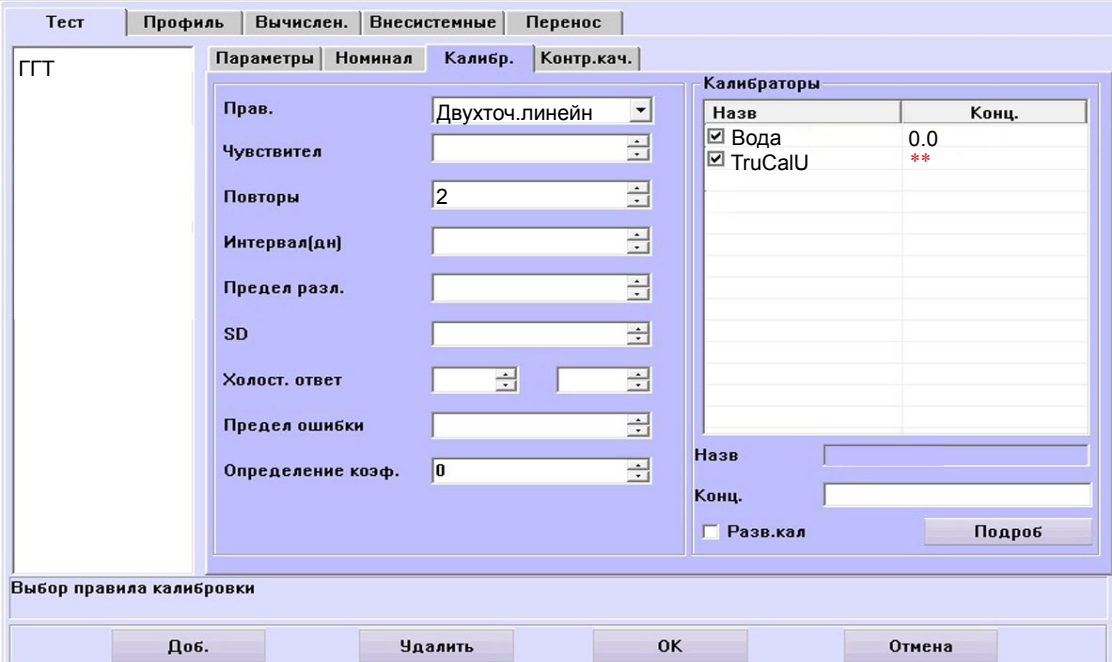

Назв	Конц.
<input checked="" type="checkbox"/> Вода	0.0
<input checked="" type="checkbox"/> TruCalU	**

\*\* -вводится из паспорта к калибратору

Значения калибраторов и контрольных материалов вводить в пунктах меню «Калибр.» и «Контр.кач.» соответственно.

Тип калибровки: Линейная (калибратор TruCalU) или по фактору.  
Контроль по TruLab N и TruLab P.