



Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-200 /200 new.

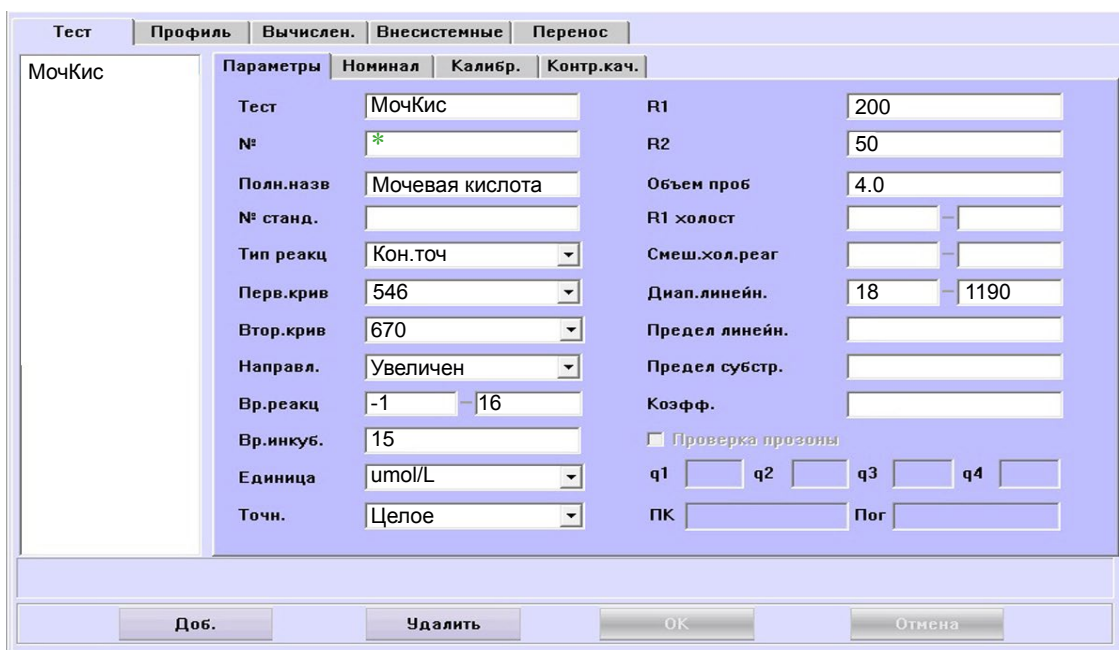

* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами


Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

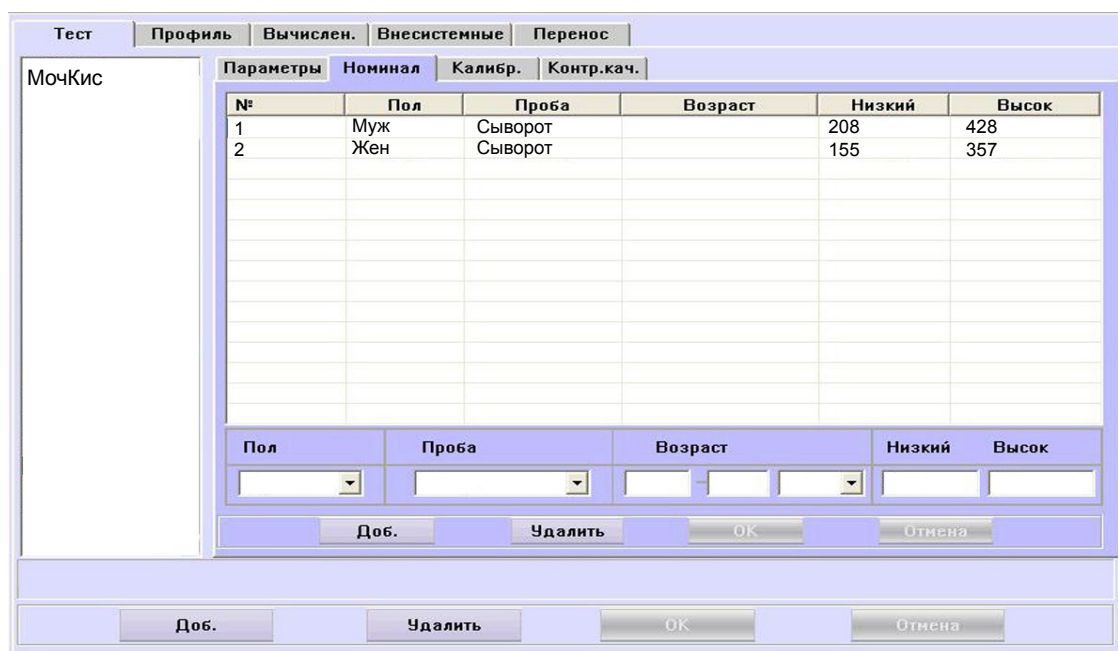

№	Пол	Проба	Возраст	Низкий	Высокий
1	Муж	Сыворот	208	155	428
2	Жен	Сыворот	155	155	357

Значения калибраторов и контрольных материалов вводить в пунктах меню «Калибр.» и «Контр.кач.» соответственно.

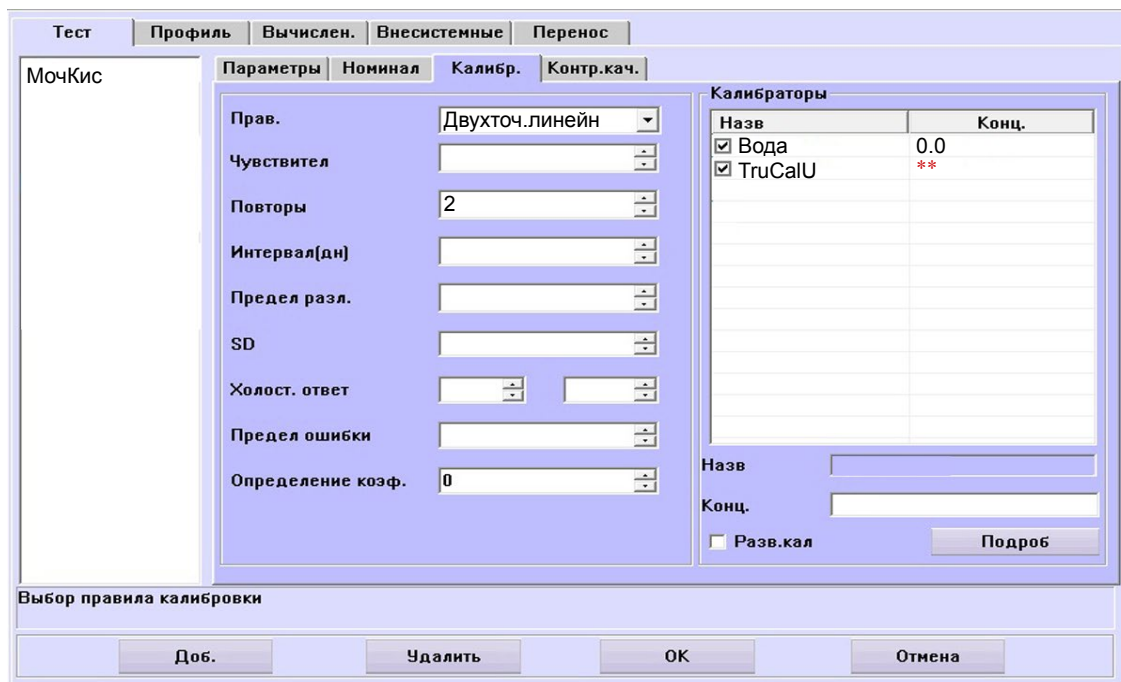

Тест Профиль Вычислен. Внесистемные Перенос

МочКис

Параметры Номинал Калибр. Контр.кач.

Прав. Двухточ.линейн

Чувствител. -

Повторы 2

Интервал(дн) -

Предел разл. -

SD -

Холост. ответ - -

Предел ошибки -

Определение коэф. 0

Калибраторы

Назв	Конц.
<input checked="" type="checkbox"/> Вода	0.0
<input checked="" type="checkbox"/> TruCalU	**

Назв -

Конц. -

Разв.кал

Выбор правила калибровки

** -вводится из паспорта к калибратору

Тип калибровки: Линейная (калибратор TruCalU).

Контроль по TruLab N и TruLab P.

Адаптации для других типов образца запрашивайте дополнительно.