

Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-480

Опред./правка химанализов

Хим.	PCT	№ *		Тип пробы	Сыворотка
Химанализ	IT			Имя для печ	Прокальцет

* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами

Тип реакции	Кинетический	Направление реакции	Положительный
Перв. д/в	660	Втор. д/в	
Ед.изм.	нг/мл	Десятич	0
Время хол.	0	Время реакции	56 80
Об. Пробы	8.8 uL	Аспирировано	
Стандарт	8.8 uL	Разбавитель	
Понижен.	2.5 uL	Холост.проб	<input type="checkbox"/>
Повышенный	12 uL	P1	105 uL
		P2	35 uL
		P3	
		P4	

Диап.линейности	0	35	<input type="checkbox"/> Автоповтор
Предел линейности			Источение субстрата
Поглощ.хол. P1	-34000	34000	Смеш.хол.погл.
Отклик холост.	-34000	34000	Вр.после открытия
Парн.химанализ			Дней
<input type="checkbox"/> Проверка прозоны	<input checked="" type="radio"/> Пров. скорости	<input checked="" type="radio"/> Внесение антигена	
Q1		Q2	
Q3		Q4	
PC		ABS	

Нормальные величины для сыворотки (плазмы):

Мужчины: 0-35

Женщины: 0-35

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

TruCal PCT, включает калибратор с конц. 0.

Контроль по TruLab PCT уровень 1 и уровень 2.