

Кальций

Arsenazo III (метод с Арсеназо III)



Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-300

Параметры анализа

| | | | |
|------------|-----------------|------------|------------|
| № | Анализ | Тип | Реакция |
| Единицы | Точность | Перв.крив | Втор.крив |
| Об. пробы. | Об. R1. | Об. R2. | Лин. преде |
| Время инк. | Антиген | Ответ | Объем проб |
| Время р | Субстрат | Н.предел | Отношение |
| R1 холост | Смеш. хол.реаг. | Линейность | Полн.назв. |
| Н.предел | Н.предел | Н.предел | № печати |
| В.предел | В.предел | В.предел | |

* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

Параметры

| | | |
|--------|-----------|------|
| Анализ | Сыворотка | Пол |
| Ca | Сыворотка | Муж. |

| № | Пол | Возраст | | Нормальн. диапазон | |
|-------------------------------------|--------------|---------|---------|--------------------|------------|
| | | Лет | Месяцев | Ниж.предел | Вер.предел |
| <input type="checkbox"/> 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <input type="checkbox"/> 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <input type="checkbox"/> 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <input type="checkbox"/> 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <input type="checkbox"/> 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <input type="checkbox"/> 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | По умолчанию | | | 2,15 | 2,57 |

Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-300

| Параметры | | Номин.диапаз | | Вычислен. | | Профиль | | Перенос | | Внесистемные | |
|-------------------------------------|--------------|--------------|---------|-----------|---------|------------|------------|---------|--------------------|--------------|------|
| Анализ | Ca | | | | | | | Проба | Сыворотка | Пол | Жен. |
| | | | | | | Возраст | | | Нормальн. диапазон | | |
| № | Пол | Лет | Месяцев | Лет | Месяцев | Ниж.предел | Вер.предел | | | | |
| <input type="checkbox"/> 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| <input type="checkbox"/> 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| <input type="checkbox"/> 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| <input type="checkbox"/> 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| <input type="checkbox"/> 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| <input type="checkbox"/> 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | По умолчанию | | | | | 2,15 | 2,57 | | | | |

| Правило | | | | Калибраторы | | | | |
|--------------------------|----------------|-------------------------------|---|-------------------------------------|------------|----------|------------|---------|
| Метод | Лин.(двухточ.) | | | Выбрано | Калибратор | № партии | Годен до | Уровень |
| Коэфф.К | 0 | Предел ошиб. для повт. обраб. | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> | TruCalU | ** | ** | ** |
| Экземпляры | 3 | Холостой ответ | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> | Water | 000 | 2020-01-01 | 0 |
| Интервал | 0 | Предел различий | 0 | | | | | |
| Чувствительность | 0 | SD | 0 | | | | | |
| Определение коэффициента | 0 | | | | | | | |

******-вводится из паспорта к калибратору

Адаптации для других типов образца запрашивайте дополнительно

Тип калибровки: Линейная (калибратор TruCalU).
Контроль по TruLab N и TruLab P.