


Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-200 /200 new.

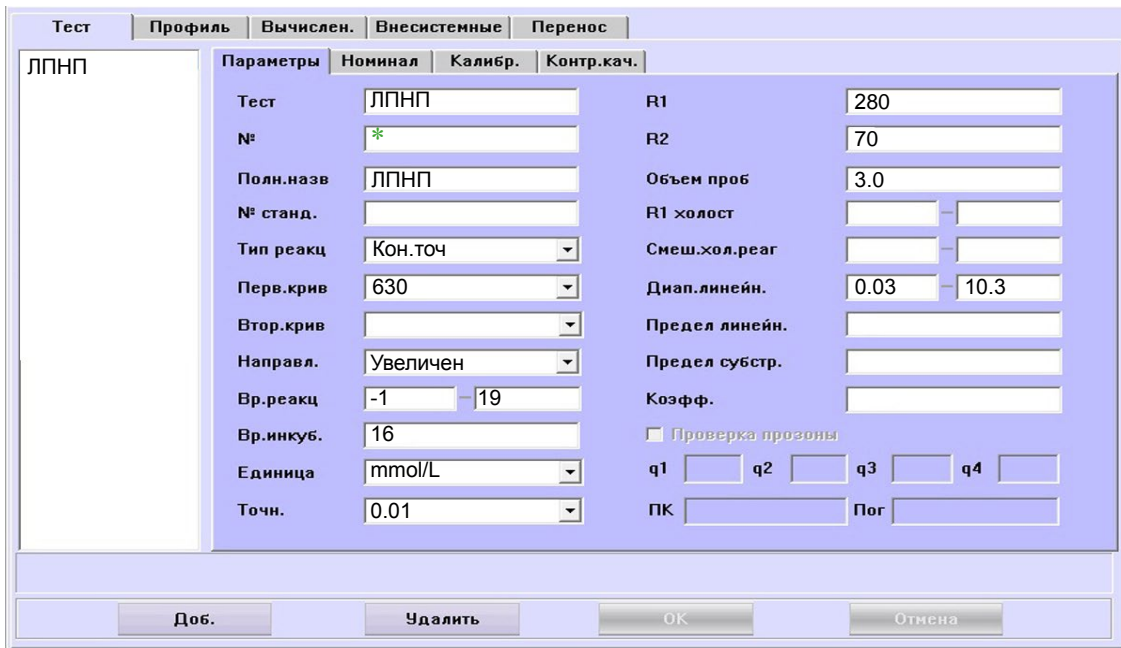


Тест	ЛПНП	R1	280
№	*	R2	70
Полн.назв	ЛПНП	Объем проб	3.0
№ станд.		R1 холост	
Тип реакц	Кон.точ	Смеш.хол.реаг	
Перв.крив	630	Диап.линейн.	0.03 - 10.3
Втор.крив		Предел линейн.	
Направл.	Увеличен	Предел субстр.	
Вр.реакц	-1 - 19	Кэфф.	
Вр.инкуб.	16	<input type="checkbox"/> Проверка прозоны	
Единица	mmol/L	q1	q2
Точн.	0.01	q3	q4
		ПК	Пог

* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

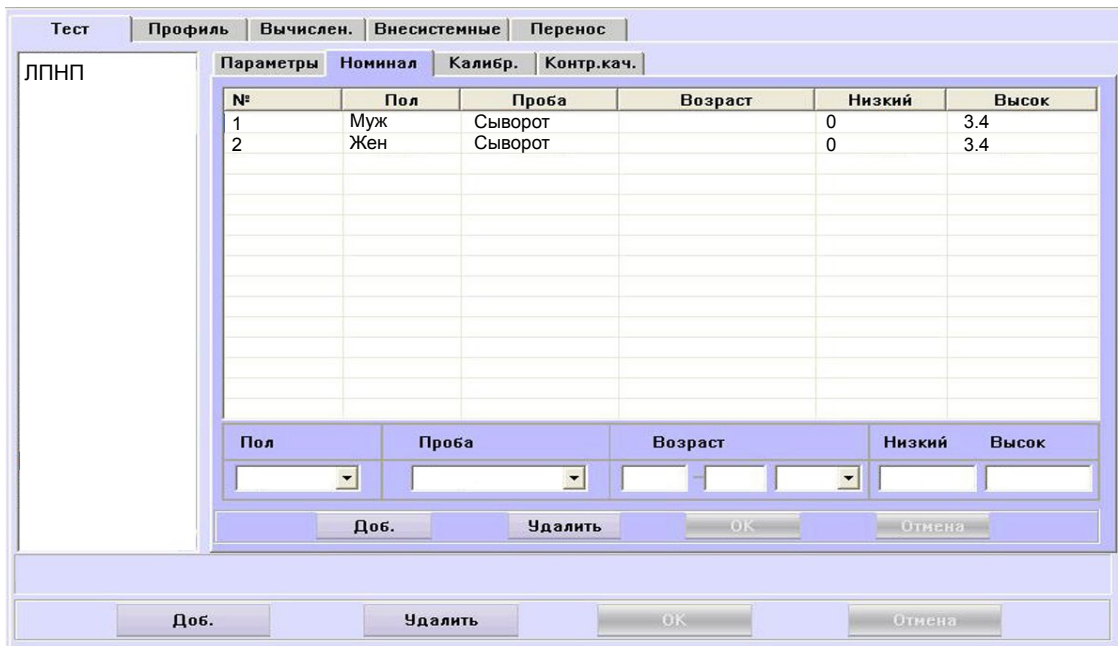

№	Пол	Проба	Возраст	Низкий	Высок
1	Муж	Сыворот		0	3.4
2	Жен	Сыворот		0	3.4

Тип калибровки: Линейная (калибратор TruCal HDL/LDL).

Контроль по TruLab N и TruLab P или по TruLab L уровень 1 и уровень 2.

