

Параметры для ввода в программу анализаторов Erba XL-640

Подробности	Объемы теста	Контрольные интервалы
★ Тест : APOB	Автоповтор : <input type="checkbox"/>	Он-лайн калибровка : <input type="checkbox"/>
Наим. отчёта : Apo-B	Cuvette Wash : <input type="checkbox"/>	Всего реагентов : 2
Ед. : g/l	Знаки п/запятой : 2	★ Реагент R1 : APOB R1
Основная дл. волны : 340	Вспомогат. : ----	★ Реагент R2 : APOB R2
Тип метода : 2POINT	Тип калибровки : 5p-logit-log	
Нач. M1 : 22	Кон. M1 : 24	
★ Нач. M2 : 60	★ Кон. M2 : 62	
Дубли пробы : 1	Дубли стандарта : 2	
Дубли контроля : 1	Интервал контроля : 0	
Напр-ние реакции : Увеличение	Предел погл. : 0.0	
Предел прозоны, % : 0	Проверка прозоны : Нижн.	
Предел лин-сти, % : 0	Приращ. погл./мин. : 0.0	
Технич. минимум : 0	Технич. максимум : 2.5	
Y=aX+b a= 1	b= 0	

Задайте он-лайн калибровку

DOWNLOAD TEST

UPLOAD TEST

УСТАН. АВТОПОВТОР

КОПИР. ТЕСТ

ИНИЦИАЛИЗ. ТЕСТ(Ы)

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

Подробности	Объемы теста	Контрольные интервалы																				
Тест : APOB	Тип пробы : SERUM																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Объемы проб</th> <th colspan="2">Типы проб</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>★ Норм. : 2 µl</td> <td>Проп. развед. : 1 X</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> SERUM</td> <td><input type="checkbox"/> URINE</td> </tr> <tr> <td>Увелич. : 5 µl</td> <td>Проп. развед. : 1 X</td> <td><input type="checkbox"/> CSF</td> <td><input type="checkbox"/> PLASMA</td> </tr> <tr> <td>Уменьш. : 2 µl</td> <td>Проп. развед. : 4 X</td> <td><input type="checkbox"/> WHOLE BLOOD</td> <td><input type="checkbox"/> OTHER</td> </tr> <tr> <td>★ Объем стандарта : 2 µl</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Объемы проб		Типы проб		★ Норм. : 2 µl	Проп. развед. : 1 X	<input checked="" type="checkbox"/> SERUM	<input type="checkbox"/> URINE	Увелич. : 5 µl	Проп. развед. : 1 X	<input type="checkbox"/> CSF	<input type="checkbox"/> PLASMA	Уменьш. : 2 µl	Проп. развед. : 4 X	<input type="checkbox"/> WHOLE BLOOD	<input type="checkbox"/> OTHER	★ Объем стандарта : 2 µl				
Объемы проб		Типы проб																				
★ Норм. : 2 µl	Проп. развед. : 1 X	<input checked="" type="checkbox"/> SERUM	<input type="checkbox"/> URINE																			
Увелич. : 5 µl	Проп. развед. : 1 X	<input type="checkbox"/> CSF	<input type="checkbox"/> PLASMA																			
Уменьш. : 2 µl	Проп. развед. : 4 X	<input type="checkbox"/> WHOLE BLOOD	<input type="checkbox"/> OTHER																			
★ Объем стандарта : 2 µl																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Объемы реагентов и скор. мешалки</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>★ Объем R1 : 200 µl</td> <td>★ Скор. мешалки R1 : Сред.</td> </tr> <tr> <td>★ Объем R2 : 40 µl</td> <td>★ Скор. мешалки R2 : Выс.</td> </tr> </tbody> </table>		Объемы реагентов и скор. мешалки		★ Объем R1 : 200 µl	★ Скор. мешалки R1 : Сред.	★ Объем R2 : 40 µl	★ Скор. мешалки R2 : Выс.															
Объемы реагентов и скор. мешалки																						
★ Объем R1 : 200 µl	★ Скор. мешалки R1 : Сред.																					
★ Объем R2 : 40 µl	★ Скор. мешалки R2 : Выс.																					

КОПИР. ОБЪЕМЫ

ПРОСМ. ОБЪЕМОВ

Аполипопротеин В

ИтипоTD (Иммунотурбидиметрический)



Параметры для ввода в программу анализаторов Erba XL-640

Подробности Объемы теста **Контрольные интервалы**

Тест : APOB

Тип пробы : SERUM

Контр. интервал : 0 ГОД(Ы) — 99 ГОД(Ы)

Категория : Муж

Контр. интервал	
Нижн. предел	Верхн. предел
* Норм.	0.8 1.55
Экстр.	0 0

Типы проб

- SERUM
- URINE
- CSF
- PLASMA
- WHOLE BLOOD
- OTHER

КОПИР. КОНТР. ИНТЕРВАЛЫ

ПРОСМ. КОНТР. ИНТЕРВАЛОВ

Подробности Объемы теста **Контрольные интервалы**

Тест : APOB

Тип пробы : SERUM

Контр. интервал : 0 ГОД(Ы) — 99 ГОД(Ы)

Категория : Жен

Контр. интервал	
Нижн. предел	Верхн. предел
* Норм.	0.8 1.55
Экстр.	0 0

Типы проб

- SERUM
- URINE
- CSF
- PLASMA
- WHOLE BLOOD
- OTHER

КОПИР. КОНТР. ИНТЕРВАЛЫ

ПРОСМ. КОНТР. ИНТЕРВАЛОВ

Тип калибровки: Логит-Лог-5Р или Сплайн, 6 точек.
Набор стандартов TruCal Apo A1-B (5 уровней)+ вода (или физраствор).
Контроль по TruLab L уровень 1 и уровень 2 или TruLab N и TruLab P.
Автоматический перезапуск анализа отключен. При необходимости данный параметр может быть активирован. ВАЖНО! В качестве разделителя целой и дробной части чисел необходимо использовать знак точки !