

Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BA-88

Стандартная	Профиль	Вычисления	Внесистемная
Lact	<input checked="" type="radio"/> Основной <input type="radio"/> Огранич. <input type="radio"/> Данн.кал <input type="radio"/> Свед.о КК		
Проверка	Lact		
Тип реакции	конечн.точка		
Пер	340	<input checked="" type="checkbox"/> X/п реаг.	
Втор		Направл	Ув.
Задерж(с)	10	Об.Аспир.(мкл)	500
Время изм.(с)	6	Темп	37
Блок	ммоль/л	Десятичн.	0,1
Полное имя	Лактат		
<input type="button" value="Добав."/> <input type="button" value="Удал."/> <input type="button" value="Сохран."/> <input type="button" value="Отмена"/> <input type="button" value="Возв."/>			

Стандартная	Профиль	Вычисления	Внесистемная
Lact	<input type="radio"/> Основной <input checked="" type="radio"/> Огранич. <input type="radio"/> Данн.кал <input type="radio"/> Свед.о КК		
Эталон по умолч.	0,5	---	2,2
Лин.диапазон	0,1	---	13,3
АБС х/п реаг.		---	
Пред.поглощен.			
Лин.предел(%)			
<input type="button" value="По дифф"/>			
<input type="button" value="Добав."/> <input type="button" value="Удал."/> <input type="button" value="Сохран."/> <input type="button" value="Отмена"/> <input type="button" value="Возв."/>			

Стандартная	Профиль	Вычисления	Внесистемная
Lact	<input type="radio"/> Основной <input type="radio"/> Огранич. <input checked="" type="radio"/> Данн.кал <input type="radio"/> Свед.о КК		
<input type="radio"/> Коэффиц.К			
<input checked="" type="radio"/> Правило	2-точ.линейная		
Повторить	2		
<input checked="" type="checkbox"/> S1	0	<input type="checkbox"/> S5	
<input checked="" type="checkbox"/> S2	См.паспорт	<input type="checkbox"/> S6	
<input type="checkbox"/> S3		<input type="checkbox"/> S7	
<input type="checkbox"/> S4		<input type="checkbox"/> S8	
<input type="button" value="Добав."/> <input type="button" value="Удал."/> <input type="button" value="Сохран."/> <input type="button" value="Отмена"/> <input type="button" value="Возв."/>			

Для данного теста допускается не использовать X/П образца