

Параметры для ввода в программу анализаторов Erba XL-100/200

Подробности	Объемы теста	Контрольные интервалы
★ Тест : ALB	Автоповтор : <input type="checkbox"/>	
Наим. отчёта : Альбумин	Он-лайн калиброе : <input type="checkbox"/>	
Ед. : g/l	Знаки п/запятой : 1	Cuvette Wash : <input type="checkbox"/>
Основная дл. волны : 546	Вспомогат. : 700	Всего реагентов : 1
Тип метода : 1POINT	Тип калибровки : Linear	★ Реагент R1 : ALB R1
Нач. M1 : 0	Кон. M1 : 0	
★ Нач. M2 : 33	★ Кон. M2 : 35	
Дубли пробы : 1	Дубли стандарта : 2	
Дубли контроля : 1	Интервал контроля : 0	
Напр-ние реакции : Увеличение	Предел погл. : 0.0	
Предел прозоны, % : 0	Проверка прозоны : Нижн.	
Предел лин-сти, % : 0	Приращ. погл./мин. : 0.0	
Технич. минимум : 2	Технич. максимум : 60	
Y=aX+b a= 1 b= 0		

Задайте он-лайн калибровку

DOWNLOAD TEST

UPLOAD TEST

УСТАН. АВТОПОВТОР

КОПИР. ТЕСТ

ИНИЦИАЛИЗ. ТЕСТ(Ы)

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

Подробности	Объемы теста	Контрольные интервалы
Тест : ALB		
Тип пробы : SERUM		
Объемы проб		Типы проб
★ Норм. : 2.0 µl	Проп. развед. : 1 X	<input checked="" type="checkbox"/> SERUM
Увелич. : 4.0 µl	Проп. развед. : 1 X	<input type="checkbox"/> URINE
Уменьш. : 2.0 µl	Проп. развед. : 2 X	<input type="checkbox"/> CSF
★ Объем стандарта : 2.0 µl		<input type="checkbox"/> PLASMA
		<input type="checkbox"/> WHOLE BLOOD
		<input type="checkbox"/> OTHER
Объемы реагентов и скор. мешалки		
★ Объем R1 : 200 µl	★ Скор. мешалки R1 : Выс.	

КОПИР. ОБЪЕМЫ

ПРОСМ. ОБЪЕМОВ

Параметры для ввода в программу анализаторов Erba XL-200

Подробности Объемы теста **Контрольные интервалы**

Тест : ALB

Тип пробы : SERUM

Контр. интервал : 0 ГОД(Ы) — 99 ГОД(Ы)

Категория : Муж

Контр. интервал		Типы проб	
	Нижн. предел	Верхн. предел	
* Норм.	: 35	52	<input checked="" type="checkbox"/> SERUM
Экстр.	: 0	0	<input type="checkbox"/> URINE
			<input type="checkbox"/> CSF
			<input type="checkbox"/> PLASMA
			<input type="checkbox"/> WHOLE BLOOD
			<input type="checkbox"/> OTHER

КОПИР. КОНТР. ИНТЕРВАЛЫ

ПРОСМ. КОНТР. ИНТЕРВАЛОВ

Подробности Объемы теста **Контрольные интервалы**

Тест : ALB

Тип пробы : SERUM

Контр. интервал : 0 ГОД(Ы) — 99 ГОД(Ы)

Категория : Жен

Контр. интервал		Типы проб	
	Нижн. предел	Верхн. предел	
* Норм.	: 35	52	<input checked="" type="checkbox"/> SERUM
Экстр.	: 0	0	<input type="checkbox"/> URINE
			<input type="checkbox"/> CSF
			<input type="checkbox"/> PLASMA
			<input type="checkbox"/> WHOLE BLOOD
			<input type="checkbox"/> OTHER

КОПИР. КОНТР. ИНТЕРВАЛЫ

ПРОСМ. КОНТР. ИНТЕРВАЛОВ

Тип калибровки: Линейная (калибратор TruCalU) или по стандарту из набора.
Контроль по TruLab N и TruLab P.

Автоматический перезапуск анализа отключен. При необходимости данный параметр может быть активирован. ВАЖНО! В качестве разделителя целой и дробной части чисел необходимо использовать знак точки !