

Антистрептолизин-О

Итипо TD (Иммунотурбидиметрический с латексными частицами)



Параметры для ввода в программу анализаторов Erba XL-100/200

Подробности	Объёмы теста	Контрольные интервалы	
★ Тест	: ASLO	Автоповтор	: <input type="checkbox"/>
Наим. отчёта	: АСЛО	Он-лайн калиброе	: <input type="checkbox"/>
Ед.	: IU/ml	Знаки п/запятой	: 0
Основная дл. волны	: 546	Вспомогат.	: -----
Тип метода	: RateA	Тип калибровки	: 5p-logit-log
Нач. M1	: 0	Кон. M1	: 0
★ Нач. M2	: 19	★ Кон. M2	: 30
Дубли пробы	: 1	Дубли стандарта	: 2
Дубли контроля	: 1	Интервал контроля	: 0
Напр-ние реакции	: Увеличение	Предел погл.	: 0.0
Предел прозоны, %	: 0	Проверка прозоны	: Нижн.
Предел лин-сти, %	: 0	Приращ. погл./мин.	: 0.0
Технич. минимум	: 7	Технич. максимум	: 800
Y=aX+b	a= 1	b= 0	

Задайте он-лайн калибровку

DOWNLOAD TEST

UPLOAD TEST

УСТАН. АВТОПОВТОР

КОПИР. ТЕСТ

ИНИЦИАЛИЗ. ТЕСТ(Ы)

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

Подробности	Объёмы теста	Контрольные интервалы	
Тест	: ASLO		
Тип пробы	: SERUM		
Объёмы проб		Типы проб	
★ Норм.	: 2.2 µl	Проп. развед.	: 1 X
Увелич.	: 5 µl	Проп. развед.	: 1 X
Уменьш.	: 2 µl	Проп. развед.	: 1 X
★ Объём стандарта	: 2.2 µl		
Объёмы реагентов и скор. мешалки			
★ Объём R1	: 180 µl	★ Скор. мешалки R1	: Сред.
★ Объём R2	: 36 µl	★ Скор. мешалки R2	: Выс.

КОПИР. ОБЪЁМЫ

ПРОСМ. ОБЪЁМОВ

Антистрептолизин-О

ИтипоTD (Иммунотурбидиметрический с латексными частицами)



Параметры для ввода в программу анализаторов Erba XL-100/200

Подробности Объемы теста **Контрольные интервалы**

Тест : ASLO

Тип пробы : SERUM

Контр. интервал : 0 ГОД(Ы) — 99 ГОД(Ы)

Категория : Муж

Контр. интервал		
	Нижн. предел	Верхн. предел
* Норм.	: 0	200
Экстр.	: 0	0

Типы проб

- SERUM
- URINE
- CSF
- PLASMA
- WHOLE BLOOD
- OTHER

КОПИР. КОНТР. ИНТЕРВАЛЫ

ПРОСМ. КОНТР. ИНТЕРВАЛОВ

Подробности Объемы теста **Контрольные интервалы**

Тест : ASLO

Тип пробы : SERUM

Контр. интервал : 0 ГОД(Ы) — 99 ГОД(Ы)

Категория : Жен

Контр. интервал		
	Нижн. предел	Верхн. предел
* Норм.	: 0	200
Экстр.	: 0	0

Типы проб

- SERUM
- URINE
- CSF
- PLASMA
- WHOLE BLOOD
- OTHER

КОПИР. КОНТР. ИНТЕРВАЛЫ

ПРОСМ. КОНТР. ИНТЕРВАЛОВ

Тип калибровки: Логит-Лог-5Р или Слайн, 6 точек. (набор стандартов TruCal ASO, 5 уровней + вода или физраствор).

Контроль по TruLab Protein уровень 1 и уровень 2.

Автоматический перезапуск анализа отключен. При необходимости данный параметр может быть активирован. ВАЖНО! В качестве разделителя целой и дробной части чисел необходимо использовать знак точки !