

АЛТ (аланинаминотрансфераза)

IFCC, without P5P (метод без перидоксальфосфата)



Параметры для ввода в программу анализатора Sapphire-400

Название		ALT			
ИНФОРМАЦИЯ О ДАННЫХ					
Единицы	U/l				
Точность	1				
Параметры анализа					
Тип	RATE				
Осн.ДВ	340				
Всп.ДВ	546				
Метод	w/o P-5-P				
Коррекция					
Y =	Наклон	X +	СДВИГ		
	1		0		
Калибровка					
Тип	Линейный				
Стандарт					
#1	*	#4			
#2		#5			
#3		#6			
Значения норм					
	Мужчина		Женщина		
	Нижн.	Верхн.	Нижн.	Верхн.	
Сыворотка	0	41	0	31	
Моча					
Плазма					
СМЖ					
Диализ					
Другое					
Страница: 1		Печать	Далее	Сохранить	Выход

*-вводится из паспорта к калибратору

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

Название		ALT				
Методика анализа						
Тип	<input type="radio"/> 1-реар <input checked="" type="radio"/> 2-реар					
Образец	ОБЪЕМ					
Реагент 1	160	μl				
Реагент 2	40					
3-е перем..	<input checked="" type="radio"/> вык <input type="radio"/> вкл					
Бланк	<input checked="" type="radio"/> по воде					
Экран						
Точка "0"	1					
Диапазон	3					
ОБРАБОТКА ДАННЫХ						
Считывание						
	Старт	Стоп				
Осн.в.	35	47				
Дополн.						
Предел Абсорбции						
	Нижн.	0.6				
	Верхн.	3				
Фактор						
Корр. бланка	**					
ПРЕДЕЛ КОН. Т. 0						
ЛИНЕЙНОСТЬ(%) 90						
Авторазведение образца						
Развести	<input checked="" type="radio"/> 99:Разв.1 <input type="radio"/> 100:Разв.2					
ПРОВЕРКА ПРОЗОНЫ						
	Старт	Стоп	ПРЕДЕЛ(%)			
ПЕРВЫЙ						
ВТОРОЙ						
	<input checked="" type="radio"/> Нижн. <input type="radio"/> Верхн					
Страница: 2		Печать	Предыдущ.	Далее	Сохранить	Выход

** -поле рекомендуется оставить пустым. При сохранении фактор коррекции бланка будет рассчитан автоматически.

АЛТ (аланинаминотрансфераза)

IFCC, without P5P (метод без перидоксальфосфата)



Параметры для ввода в программу анализатора Sapphire-400

Название		ALT							
Повтор с авторазведением									
<input checked="" type="radio"/> вкл <input type="radio"/> выкл									
Предел линейности методики									
<input type="radio"/> вк <input checked="" type="radio"/> вык <input type="radio"/> вкл <input checked="" type="radio"/> выкл									
		Нижн. Верхн.							
Сыворотка	0	600							
Моча									
Плазма									
СМЖ									
Диализ									
Другое									
Объемы флаконов для реагентного штатива (мл)									
На 24 позиции		На 36 позиций							
РЕАГЕНТ1	60	РЕАГЕНТ1	32,5						
РЕАГЕНТ2 P1	40	РЕАГЕНТ2 P1	26,25						
РЕАГЕНТ2 P2	20	РЕАГЕНТ2 P2	13						
Авторазведение по заданному пределу абсорбции									
Предел абсорбции									
Нижн.		<input checked="" type="radio"/> вкл <input type="radio"/> выкл							
Верхн.		<input type="radio"/> вкл <input checked="" type="radio"/> выкл							
Предел прозоны <input type="radio"/> вкл <input checked="" type="radio"/> выкл									
Предупреждающий диапазон									
		Мужчина		Женщина					
		Верхн. Нижн.		Верхн. Нижн.					
Сыворотка									
Моча									
Плазма									
СМЖ									
Диализ									
Другое									
Страница: 3		Печать		Предыдущ.		Сохранить		Выход	

Включен автоматический перезапуск анализа с разведением при выходе за диапазон линейности метода. При необходимости данный параметр может быть отключен.

ВАЖНО! В качестве разделителя целой и дробной части чисел необходимо использовать знак **точки** !