

Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-200 /200 new.

## Биреагент

Тест		Профиль	Вычислен.	Внесистемные	Перенос
ЛДГ					
Параметры Номинал Калибр. Контр.кач.					
Тест	ЛДГ	R1	240		
№	*	R2	60		
Полн.назв	ЛДГ	Объем проб	3		
№ станд.		R1 холост			
Тип реакц	Кинетич	Смеш.хол.реаг			
Перв.крив	340	Диап.линейн.	5 - 1200		
Втор.крив	546	Предел линейн.			
Направл.	Уменьшен	Предел субстр.	6000		
Вр.реакц	3 - 13	Коефф.			
Вр.инкуб.	12	<input type="checkbox"/> Проверка прозоны			
Единица	U/L	q1		q2	
Точн.	Целое	q3		q4	
		ПК		Пог	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>Доб.</span> <span>Удалить</span> <span>OK</span> <span>Отмена</span> </div>					

## Монореагент

Тест		Профиль	Вычислен.	Внесистемные	Перенос
ЛДГ1					
Параметры Номинал Калибр. Контр.кач.					
Тест	ЛДГ1	R1	300		
№	*	R2	0		
Полн.назв	ЛДГ	Объем проб	3		
№ станд.		R1 холост			
Тип реакц	Кинетич	Смеш.хол.реаг			
Перв.крив	340	Диап.линейн.	5 - 1200		
Втор.крив	546	Предел линейн.			
Направл.	Уменьшен	Предел субстр.	6000		
Вр.реакц	7 - 16	Коефф.			
Вр.инкуб.		<input type="checkbox"/> Проверка прозоны			
Единица	U/L	q1		q2	
Точн.	Целое	q3		q4	
		ПК		Пог	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>Доб.</span> <span>Удалить</span> <span>OK</span> <span>Отмена</span> </div>					


\* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами

Тип калибровки: Линейная (калибратор TruCalU) или по фактору.  
Контроль по TruLab N и TruLab P.


## Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-200 /200 new.

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

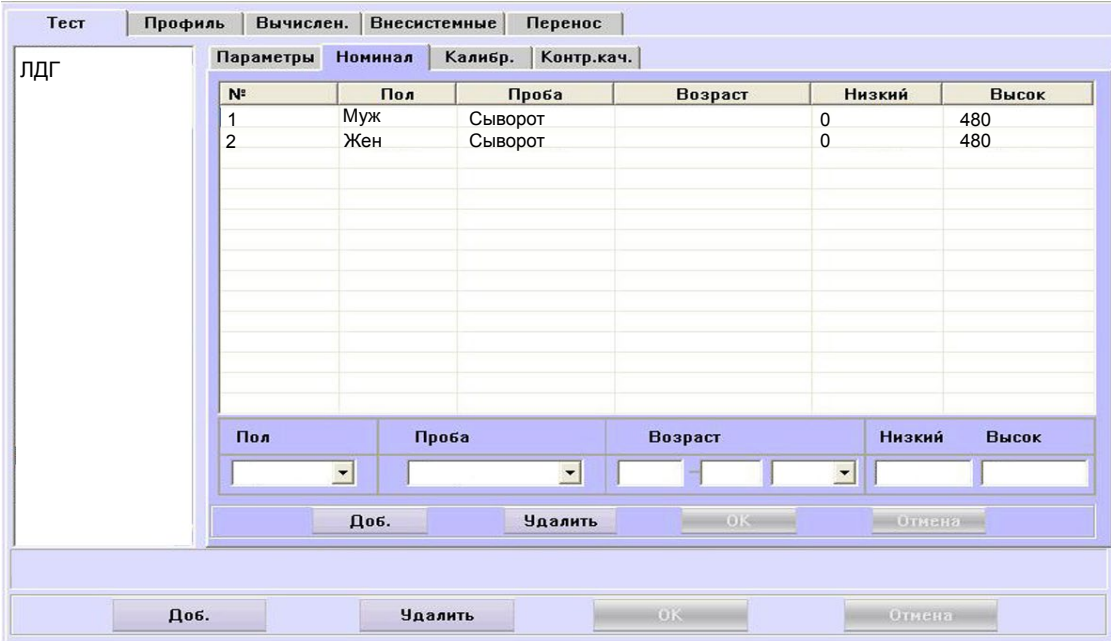

№	Пол	Проба	Возраст	Низкий	Высок
1	Муж	Сыворот		0	480
2	Жен	Сыворот		0	480

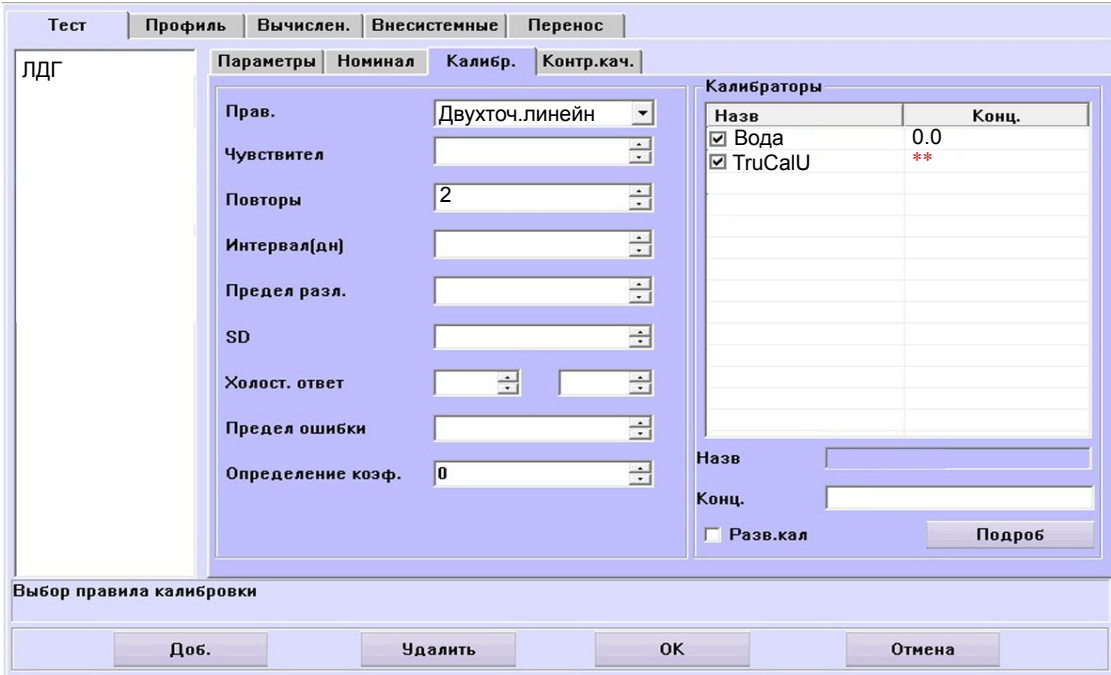

Назв	Конц.
<input checked="" type="checkbox"/> Вода	0.0
<input checked="" type="checkbox"/> TruCalU	**

\*\* - вводится из паспорта к калибратору

Значения калибраторов и контрольных материалов вводить в пунктах меню «Калибр.» и «Контр.кач.» соответственно.