

Комплемент СЗс

ИттипоТD (Иммунотурбодиметрический)



Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BA-88

Стандартная	Профиль	Вычисления	Внесистемная	
СЗс	<input checked="" type="radio"/> Основной <input type="radio"/> Огранич. <input type="radio"/> Данн.кал <input type="radio"/> Свед.о КК			
	Проверка	СЗс		
	Тип реакции	конечн.точка		
	Пер	340	<input checked="" type="checkbox"/> X/п реаг.	
	Втор		Направл	Ув.
	Задерж(с)	10	Об.Аспир.(мкл)	500
	Время изм.(с)	6	Темп	37
	Блок	мг/дл	Десятичн.	1
	Полное имя	Комплемент СЗс		
	Добав.	Удал.	Сохр.	Отмена

Стандартная	Профиль	Вычисления	Внесистемная	
СЗс	<input type="radio"/> Основной <input checked="" type="radio"/> Огранич. <input type="radio"/> Данн.кал <input type="radio"/> Свед.о КК			
	Эталон по умолч.	90	---	180
	Лин.диапазон	1	---	500
	АБС х/п реаг.		---	
	Пред.поглощен.			
	Лин.предел(%)			
	<input type="text" value="По дифф"/>			
Добав.	Удал.	Сохр.	Отмена	Возвр.

Стандартная	Профиль	Вычисления	Внесистемная		
СЗс	<input type="radio"/> Основной <input type="radio"/> Огранич. <input checked="" type="radio"/> Данн.кал <input type="radio"/> Свед.о КК				
	<input type="radio"/> Коэффиц.К				
	<input checked="" type="radio"/> Правило	Log 5P			
	Повторить	2			
	<input checked="" type="checkbox"/> S1	0	<input checked="" type="checkbox"/> S5	См.паспорт	
	<input checked="" type="checkbox"/> S2	См.паспорт	<input checked="" type="checkbox"/> S6	См.паспорт	
	<input checked="" type="checkbox"/> S3	См.паспорт	<input type="checkbox"/> S7		
	<input checked="" type="checkbox"/> S4	См.паспорт	<input type="checkbox"/> S8		
	Добав.	Удал.	Сохр.	Отмена	Возвр.

ВАЖНО для данного теста стоит использовать X/П образца