



## Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-400

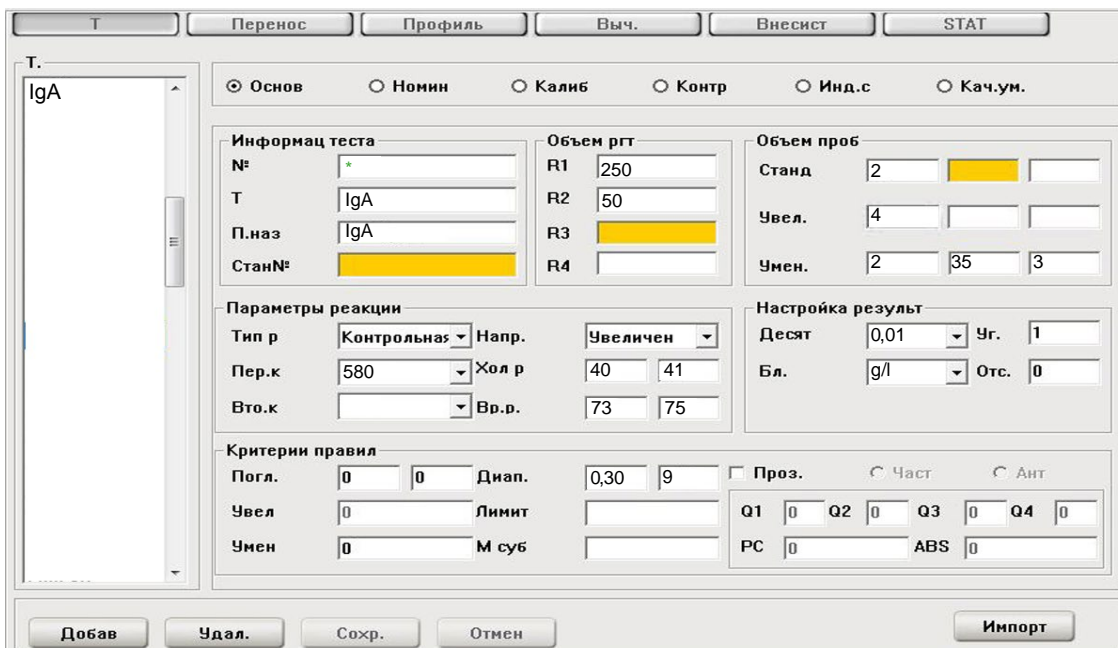

\* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами


Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

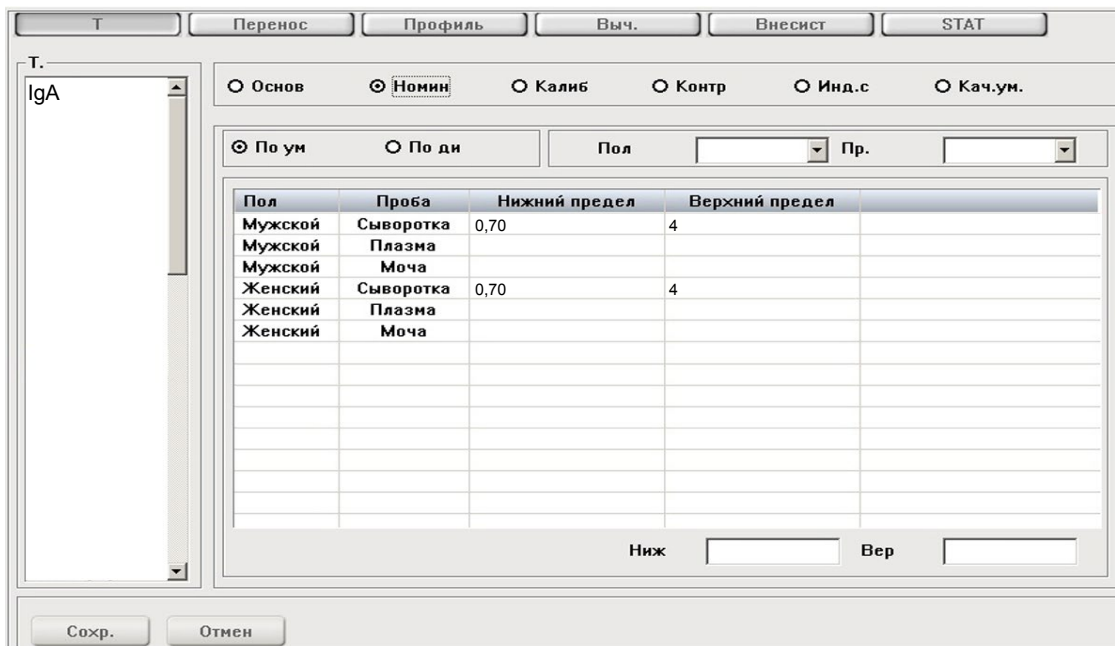

Пол	Проба	Нижний предел	Верхний предел
Мужской	Сыворотка	0,70	4
Мужской	Плазма		
Мужской	Моча		
Женский	Сыворотка	0,70	4
Женский	Плазма		
Женский	Моча		

## Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-400

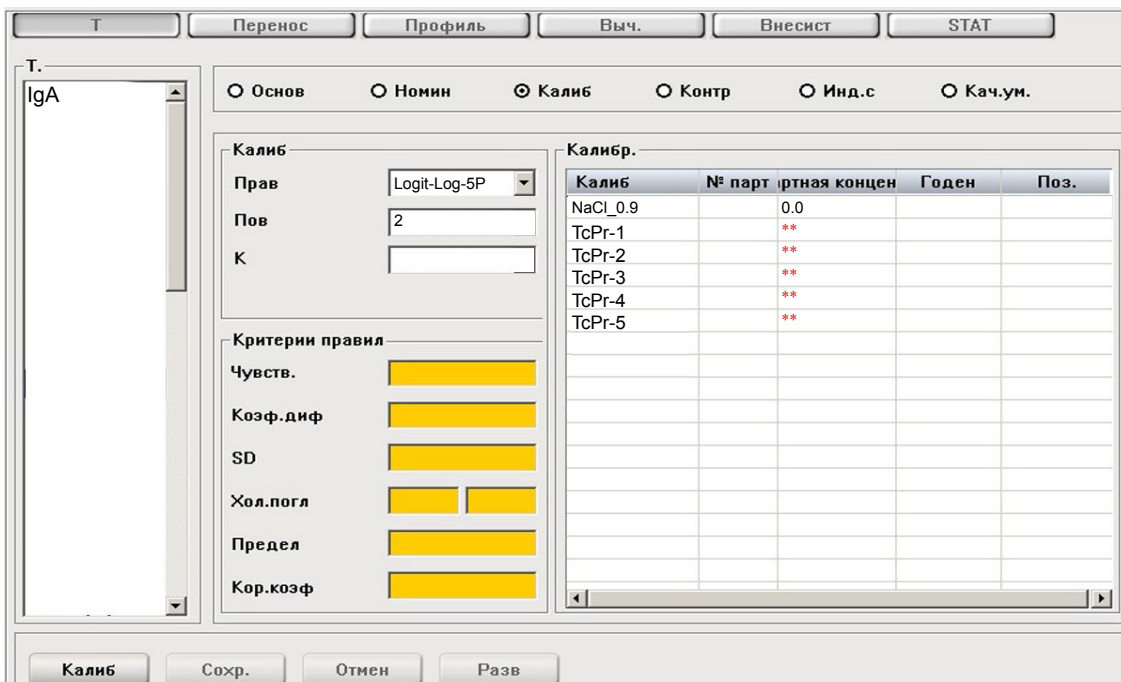

Калиб	№ парт	ртная концен	Годеп	Поз.
NaCl_0.9		0.0		
TcPr-1		**		
TcPr-2		**		
TcPr-3		**		
TcPr-4		**		
TcPr-5		**		

\*\* - вводится из паспорта к калибратору

Тип калибровки: Log-Logit или сплайн, 6 точек (набор стандартов TruCal Protein, 5 уровней+ вода (физраствор)).

Контроль по TruLab Protein уровень 1 и уровень 2 или по TruLab N и TruLab P.